



 **surestep**
TLSO
órtesis
torácica-sacrolumbar

nuestra tlo

La Surestep TLSO ha redefinido el tratamiento de la columna vertebral. El plástico blando y flexible es ideal para crear una posición vertical mejorada, al tiempo que permite un ligero movimiento en todos los planos.

Al distribuir de manera más uniforme la presión circunferencialmente, este dispositivo único crea una estabilidad sin rigidez, permitiendo que el torso continúe fortaleciéndose.

Fabricada de forma personalizada respetando las medidas del paciente, impresiones de los yesos o los escaneos de imágenes, la Surestep TLSO viene completa con una interfaz suave que está disponible en varios espesores para ofrecer una mayor comodidad y cumplimiento del régimen.



La Surestep TLSO está disponible con una abertura anterior o posterior y se puede modificar para dar cabida a sondas gástricas, bombas de baclofeno, etc. La Surestep TLSO es la solución ideal para muchos niños en silla de ruedas que tienen dificultades para mantener una posición erguida.



Recorte abdominal



Ventana anterior



Modificación de placas

indicaciones

- ▶ Incapacidad para controlar la posición en la silla de ruedas
- ▶ Inestabilidades posturales del tronco
- ▶ Cifosis o lordosis flexible

contraindicaciones

- ▶ Curvaturas escolióticas fijas
- ▶ Escoliosis idiopática del adolescente
- ▶ Limitaciones respiratorias graves

codificación sugerida

- ▶ L0482x1

variaciones

- ▶ Intervención temprana (0.75 mm)
- ▶ Estándar (1.25 mm)
- ▶ Adulto (2 mm)

modificaciones

- ▶ Modificaciones de placas
- ▶ Aberturas anterior/posterior
- ▶ Sonda gástrica/bombas de baclofeno
- ▶ Recorte abdominal

uso y cuidado

Su nueva TLSO ha sido diseñada, fabricada y ajustada específicamente para usted. Queremos que este dispositivo le genere las menos preocupaciones posibles. Tenga en cuenta que es habitual el tener que realizar ajustes simples para mejorar el ajuste o la comodidad.

instrucciones de cuidado

Su TLSO está fabricada a partir de materiales de alta calidad que requieren una limpieza periódica con un jabón suave disuelto en agua tibia y un paño limpio*. Evite usar almohadillas abrasivas o limpiadores agresivos. Durante la limpieza, asegúrese de inspeccionar su aparato ortopédico en busca de bordes afilados, desgaste, correas rotas o cualquier otro problema que deba resolver un ortopedista.

**El forro debe lavarse con alcohol y un paño suave (esto se secará rápidamente y desinfectará las superficies en contacto con su cuerpo)*


instrucciones de uso

- ▶ Báñese a diario.
- ▶ Use una camisa ajustada, hecha de material "transpirable", como algodón, debajo de la órtesis.
- ▶ Preste atención especial a zonas rojas o rosadas en la piel donde la presión de la órtesis puede ser alta. La piel debería volver a su color "normal" a los 20 minutos de retirar su TLSO. Dado que la TLSO se usa muy apretada, es importante tener en cuenta que es normal que tenga un tono rosado en la piel.
- ▶ Cualquier deterioro de la piel que derive en una ampolla o llaga abierta debe ser notificado a su médico de inmediato y la TLSO no deberá volverse a usar hasta que se le indique.



colocación y retiro

- ▶ Si su nueva TLSO se abre por delante, es mejor ponérsela acostado boca arriba (en posición supina). Si su TLSO se abre por detrás, es mejor ponérsela echado boca abajo (decúbito ventral).
- ▶ Si no es posible colocarse su TLSO acostado, inténtelo sentado o de pie, aunque la posición preferida es acostado.
- ▶ Coloque la TLSO en la superficie donde se lo pondrá (A)
- ▶ Recuéstese en la TLSO ubicando las crestas para la cintura en el hueco suave de su cintura (B)
- ▶ Comenzando con la correa del medio, pase la correa a través del cierre (hebilla en forma de D) y tire de ella hacia atrás. No apriete la correa en este momento (C). Luego repita el proceso con las correas superior e inferior, apretando cada correa un poco más fuerte que la anterior.
- ▶ Revise cada correa y asegúrese de que estén apretadas firmemente hacia la línea marcada para ofrecer una tensión adecuada (D)
- ▶ Use su órtesis durante el tiempo prescrito, según lo indique su médico u ortopedista.
- ▶ Quitarse la TLSO es muy simple y no requiere de un posicionamiento específico. Simplemente suelte todas las correas y gire lentamente la TLSO para quitarlo de su cuerpo.
- ▶ Si tiene algún problema asociado con este dispositivo, comuníquese con su médico de inmediato.

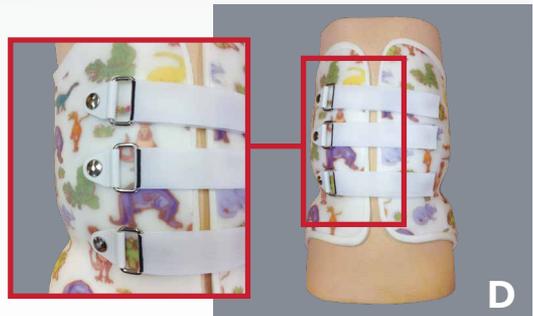

 **surestep**

17530 Dugdale Dr. South Bend, IN
surestep.net | 877.462.0711